


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

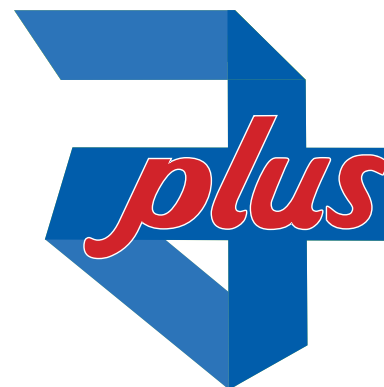

MyClean® DS OA

Schnelldesinfektion ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion auf wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Gute Reinigungsleistung
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas



Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet.

Ausführungen: MyClean® DS OA – Schnelldesinfektion ohne Alkohol

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	1 L	79613	4046153116164	10305769	12
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	10 L	79614	4046153116188	10305781	1

Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40:	konzentriert - 1 Minute
Wirksam gegen Noro-Viren:	konzentriert - 2 Stunden


Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten:
Wirkstoffe: 0,2 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,
0,64 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Qualitätssicherung: MPG, Richlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

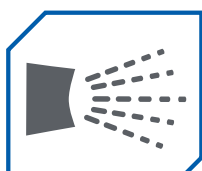

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-OA-20170310